

手術器具の洗浄方法

【洗浄】

- 黄色枠内の、つるつるとした部分はスポンジに洗剤を含ませて汚れを洗い落とします
- 水色枠内の、ギザギザとした部分はブラシに洗剤を含ませて汚れを洗い落とします



溝が縦長
↓
スポンジ





溝が横短
↓
ブラシ

※ピンセット先端の汚れは落ちにくいいため念入りに洗浄してください※

汚れが残っているピンセット

洗浄されたピンセット

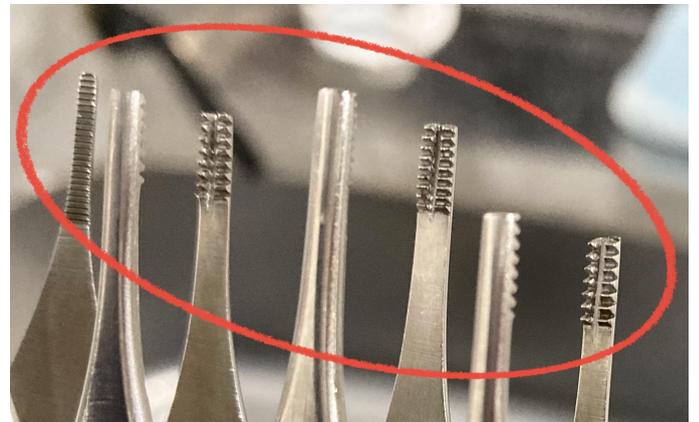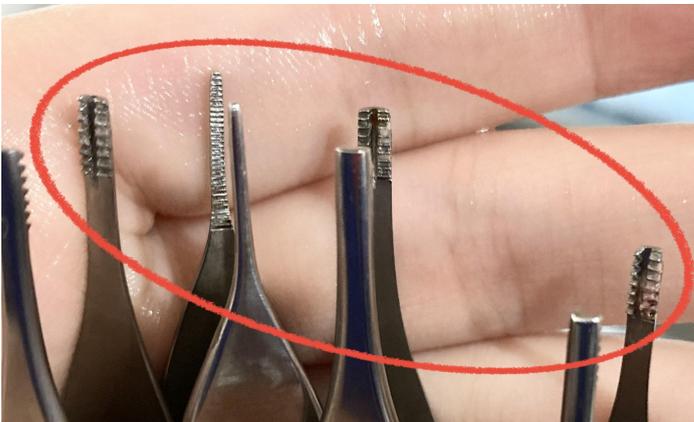

【すすぎ～乾燥】

- スポンジやブラシで洗浄した後、水でよくすすぎます。
- すすいだ器具は、お貸しする網桶に入れてニコワゴンまでご返却ください。

